


注意: 如有服用含有生物素 (Biotin) 或助生髮的口服補充劑, 請在檢測前 3-5 天暫停服用, 以免造成檢測結果無效。

1 檢測前10分鐘請勿進食或喝水。打開檢測盒, 確認所有組件齊備。

每個供單次檢測用的CovAbScreen™檢測盒包括:

- A. 移液器 (滴管) 一支
- B. 樣本採集管 (內含樣本溶液) 一支
- C. 獨立包裝的口腔拭子一支
- D. 貼箔保護袋一個, 內含檢測棒一支及乾燥劑

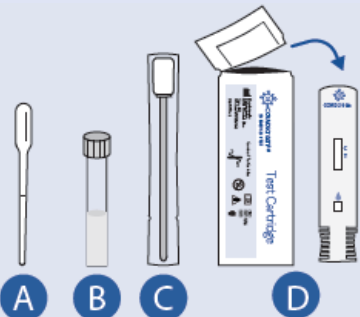

檢測盒中未提供的必需品: 計時器


2 打開樣本採集管, 將其放置於**水平檢面**。
注意: 請勿打翻。




3 打開口腔拭子的包裝, 取出拭子。



4 將口腔拭子的纖維棒頭其中一面沿上側牙齦線 (**牙齒與牙齦交匯處**) 從右往左**緩慢** 擦拭至口腔內部 (**大約10秒**); 然後從左往右重覆。再將其棒頭翻轉至另一面, 重覆上述動作擦拭下牙齦線。
注意: 請勿用力刮擦, 避免損傷牙齦。
建議: 對著鏡子進行上述步驟。

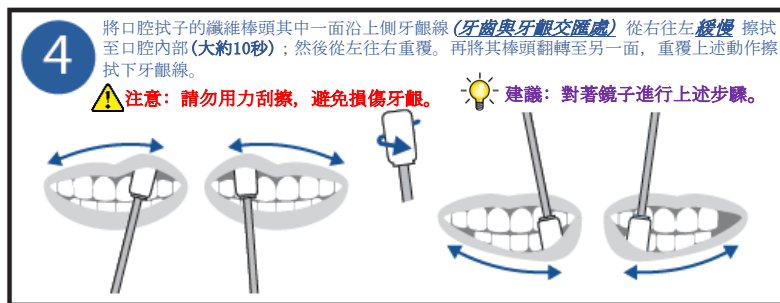

5 將拭子棒頭插入樣本採集管, 輕巧地把它在溶液中上下抽動 6-8次, 使收集到的唾液與樣本溶液充分接觸和混合。
注意: 請勿溢出液體。

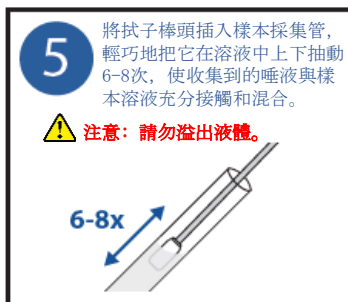


6 將纖維棒頭的兩面先後貼在管壁上擠壓, 把棒頭內的液體全部擠出。隨後取出拭子並丟棄。




7 打開檢測棒的外包裝, 把檢測棒放置於**水平檢面**。丟棄乾燥劑包。
注意: 請勿傾斜。



8 用滴管從樣本採集管中取樣。先按壓滴管頭部, 排空滴管內的空氣。捏緊頭部將滴管插入液面下方, 然後輕力放鬆滴管頭部, 讓液體吸上滴管。

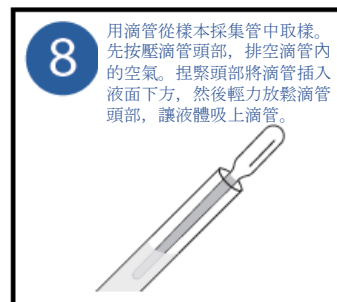


9 慢慢擠壓滴管頭部, 在檢測棒樣本孔滴入 5 滴樣本液。

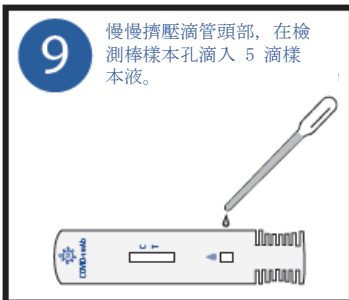


10 設定計時器, 開始計時15分鐘。隨著檢測的進行, 讀取窗口會開始顯現出紅色。



11 15分鐘後, 即可觀察檢測棒讀取窗口顯示的紅線。結果的讀取需在5分鐘內完成。加樣後超過20分鐘讀取的结果無效。

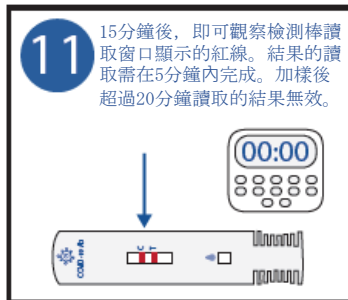

12 檢測結果解讀

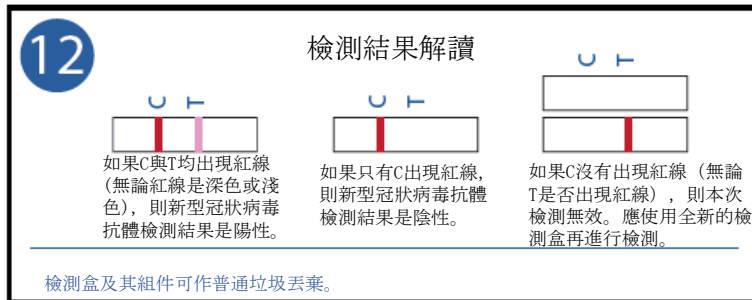

如果C與T均出現紅線 (無論紅線是深色或淺色), 則新型冠狀病毒抗體檢測結果是陽性。

如果只有C出現紅線, 則新型冠狀病毒抗體檢測結果是陰性。

如果C沒有出現紅線 (無論T是否出現紅線), 則本次檢測無效。應使用全新的檢測盒再進行檢測。

檢測盒及其組件可作普通垃圾丟棄。

